

# Skötselråd tyngdtäcke

## TVÄTT AV TYNGDTÄCKE

ProCare tyngdtäcken går att tvätta i 60°C i vanlig tvättmaskin. Vi rekommenderar fintvätt för maximal livslängd. Använd tillhörande tvättpåse och häng upp täcket för att torka efter tvätt. Täcket kan även plantorkas.

Många tvättmaskiner har 6 till 8 kg som maxvikt. Täcken som väger mer än 6 kg kan därför delas på mitten genom en dragkedja. Vi rekommenderar att de två delarna tvättas separat.



## TRANSPORT & FÖRVARING

Använd den medföljande bomullsväska vid transport och förvaring av tyngdtäcket.

## DESINFEKTION OCH REKONDITIONERING

Rekonditionering och desinfektion sker med tvätt av tyngdtäcket i en temperatur på 70°C (i mild process, och tvättpåse ska användas). Täcken som väger över 6 kg är delbara och varje del tvättas var för sig.

## TIPS! VIK IHOP TÄCKET

1. Lägg täcket på sängen.
2. Vik över ena långsidan till mitten på täcket.
3. Vik över andra långsidan till kanten på täcket.
4. Vik täcket från kortsidan i 3 delar.
5. Öppna hela dragkedjan på väskan och lägg ner täcket.

## Vikter och modeller

### TYNGDTÄCKE VUXEN

ProCare Pearl, 4 kg  
ProCare Pearl, 6 kg  
ProCare Pearl, 8 kg  
ProCare Pearl, 10 kg  
ProCare Pearl, 12 kg  
ProCare Pearl, 14 kg

### ART.NR

cce-v-150-4  
cce-v-150-6  
cce-v-150-8  
cce-v-150-10  
cce-v-150-12  
cce-v-150-14

### TYNGDTÄCKE BARN

ProCare Pearl, 3 kg  
ProCare Pearl, 5 kg  
ProCare Boll, 3 kg  
ProCare Boll, 5 kg

### ART.NR

cce-b-100-3  
cce-b-100-5  
PBoll-b-100-3  
PBoll-b-100-5

ProCare Boll, 4 kg  
ProCare Boll, 6 kg  
ProCare Boll, 8 kg  
ProCare Boll, 10 kg  
ProCare Boll, 12 kg  
ProCare Boll, 14 kg  
ProCare Boll, 16 kg

PBoll-v-150-4  
PBoll-v-150-6  
PBoll-v-150-8  
PBoll-v-150-10  
PBoll-v-150-12  
PBoll-v-150-14  
PBoll-v-150-16